

Monitor Upgrade Kit DIN 6868-157

Ziehm 8000

Das DIN 6868-157 Monitor Upgrade Kit für die Produktfamilie Ziehm 8000 und Ziehm Vista ist für alle Systeme mit Monitorwagen erhältlich, unabhängig davon, ob der C-Bogen mit CRT Monitoren oder mit TFT Displays ausgestattet ist.

Im Monitor Upgrade Kit enthalten sind zwei neue 14" TFT-Monitore mit Befundqualität zur Abnahme nach DIN6868-157 mit zugehöriger Halterung sowie ein Softwareupdate für den HEDIS Bildrechner mit den entsprechenden Testbildern.



A Systemanalyse

Im ersten Schritt muss das bestehende System überprüft und der Umfang des Upgrades festgelegt werden.

	CRT	TFT 23"²	TFT 18,1"
Neue Monitore: Befundqualität	✓	✓	✓
Softwareupdate	✓	✓	✓
TFT Lizenz	✓	✓	—
Adapter Monitorhalterung	—	✓	✓
TFT Monitorhalterung	✓	—	—
Entsorgung Altmonitore	✓	✓	✓

B Monitorumbau

- Deinstallation der alten Monitore
- Installation der Monitorhalterung oder Adapterplatte
- Installation von zwei neuen 19" TFT-Displays
- Kalibrierung und einstellen der neuen Monitore
- Aktivierung TFT Lizenz



C Abnahmeprüfung

- HEDIS Softwareupdate
- Import Testbilder auf HEDIS Rechner
- Abnahmeprüfung des Live-Monitors nach DIN 6868-157
- Festlegung der Konstanzprüfung³

¹ Die Ziehm 8000 Produktfamilie umfasst Systeme mit den Bezeichnungen Ziehm 8000, Ziehm Exoscop 8000, Ziehm 8000 Litho, Ziehm Vista, Ziehm Vista Endo, Ziehm Vista Plus und Ziehm Vista Vario.

Kompakte C-Bögen mit Gerätebezeichnungen wie Ziehm Compact sind zwar ebenfalls aus der Ziehm 8000 Produktfamilie, jedoch ist bei diesen kein Monitor Upgrade möglich.

² C-Bogen mit TFT Einzelmonitor m. geteilter Anzeige

³ Leuchtdichte- und Beleuchtungsstärkemessgerät des Betreibers erforderlich

